



## FASE RIPARATIVA

ACIDO IALURONICO 2%  
PER USO INTRADERMICO

## INTRODUZIONE

**ELAIAL** è un acido ialuronico di ultima generazione, realizzato per riparare la matrice extracellulare (ECM) danneggiata dall'invecchiamento e per ripristinare la funzione fisiologica della pelle.

**ELAIAL** riattiva inoltre la struttura fondamentale della matrice extracellulare della cute, in modo che le cellule coinvolte nella fase di rigenerazione di nuove fibre, possano trovare le relazioni funzionali fisiologiche. Aumenta la capacità biosintetica dei fibroblasti, stimola l'attività cellulare e la sintesi di collagene, elastina e HA (acido ialuronico). È inoltre in grado di ritardare in modo significativo il foto-invecchiamento cronico della pelle.

**ELAIAL** grazie alla sua efficacia, struttura l'ECM e rivitalizza la pelle disidratata e danneggiata dall'invecchiamento e dall'esposizione al sole. Può essere utilizzato prima dell'uso di filler intradermici. Migliora la densità della pelle attraverso la ristrutturazione della matrice extracellulare.

**ELAIAL** stimola l'attività dei fibroblasti con formazione di nuove fibre di collagene ed elastina.

## DESCRIZIONE

**ELAIAL** è un gel intradermico sterile, biodegradabile e isotonic. È costituito da un acido ialuronico a medio peso molecolare ( $1,5-2,0 \times 10^6$  Dalton), ottenuto dai batteri *Streptococcus Equi*, formulato ad una concentrazione di 20 mg/ml in un tampone fisiologico.

## AZIONI

- Idrata profondamente
- Abbatte i radicali liberi
- Limita la cheratosi attinica
- Promuove la neo angiogenesi

## INDICAZIONI

**ELAIAL** è indicato nel processo fisiologico dell'invecchiamento cutaneo, i cui effetti includono l'ispessimento dello strato corneo e l'alterazione delle fibre elastiche del derma in caso di cicatrizzazione derivante da lesioni cutanee superficiali (ad esempio, cicatrici da acne e varicella).

## SCHEMA TECNICA PRODOTTO

DESCRIZIONE PRODOTTO		Gel intradermico sterile, biodegradabile e isotonico, innovativo sostituto della Matrice Extracellulare, formulato ad una concentrazione di 20 mg/ml in un tampone fisiologico. Siringa preriempita contenente 2 ml di gel non pirogenico, sterilizzata con calore umido.		
CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PRODOTTO				
PRINCIPI ATTIVI		Ialuronato di sodio 20 mg/ml con un peso molecolare di 1,5 milioni di Dalton e 2 milioni di Dalton non reticolato.		
ECCIPIENTI		Sodio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico, cloruro di sodio, acqua di grado iniettabile.		
MATERIALE PACK. PRIMARIO		Siringa in vetro in blister	VOLUME	2 ml
MATERIALE PACK. SECONDARIO		Cartoncino		
COLORE		Trasparente	STERILITÀ	Sterile
APPLICAZIONE DELLA LEGGE E DELLE DIRETTIVE		Dispositivo medico di classe III come da direttiva 92/43/CEE, fabbricato in conformità ai requisiti ISO 13485 e regolamento (UE) 2017/745.		
FINALITÀ		ELAIAL è indicato nel processo di invecchiamento fisiologico della pelle, i cui effetti includono l'ispessimento dello strato corneo (aumento di rughe, diminuzione della luminosità della pelle) e l'alterazione delle fibre elastiche del derma.		
MODALITÀ D'USO	PROTOCOLLO E DOSAGGIO			APPROCCIO APPLICATIVO
	A discrezione del medico	Dipende delle condizioni della ECM. 3-4 trattamenti all'anno. Da rivedere ogni anno.		Iniettare nel derma-medio
AREA DI APPLICAZIONE		Consigliato per uso intradermico. (Medicina estetica e dermatologia)		
MARCHIO CE		CE 0476		
PRODUZIONE		3 mesi		
PRECAUZIONI DI TRASPORTO		Temperatura controllata		
PRECAUZIONI DI CONSERVAZIONE		Tenere in un luogo asciutto, evitare l'umidità, tenere lontano dalla luce solare e fluorescente, conservare tra +2° e +25° C.		
QUANTITÀ D'ORDINE MINIMO (MOQ)		2520 unità		
SCADENZA		36 mesi, dopo la data di produzione		
TRADEMARK		ELAIAL		
FABBRICANTE		THE WAVE INNOVATION GROUP SRL, ITALIA		

Contatto:  
FRANSIN KELEN TERRANI  
COMMERCIAL MANAGER  
Cell. +39 392 542 2339  
administration@thewaveinnovation.com

**THE WAVE INNOVATION GROUP S.r.l.**  
Via Mons. Luigi Bellotti, 16  
37139 Verona, Italy  
www.thewaveinnovation.com  
info@thewaveinnovation.com

